

# Gode råd ved valg af den rigtige størrelse på transportkørestol



## A: Sædebredden:


Tag målet over det bredeste sted (hofter eller lår), mens brugeren sidder. Læg dertil 1-2 cm i hver side for plads til overtøj, tæppe eller lignende.

## B: Højden på benstøtter:

Målet tages fra knæhasen til underkanten af skohæl med 90° bøjet knæ. Sædepudens højde på 10 cm trækkes fra underbensmålet, og derved findes benstøtتهøjden. Højden på benstøtterne kan indstilles individuelt – se i den medfølgende brugsvejledning

## Armlæns højden:

Når brugeren sidder i stolen, indstilles armlæns højden, så armen hviler let på armlænet.

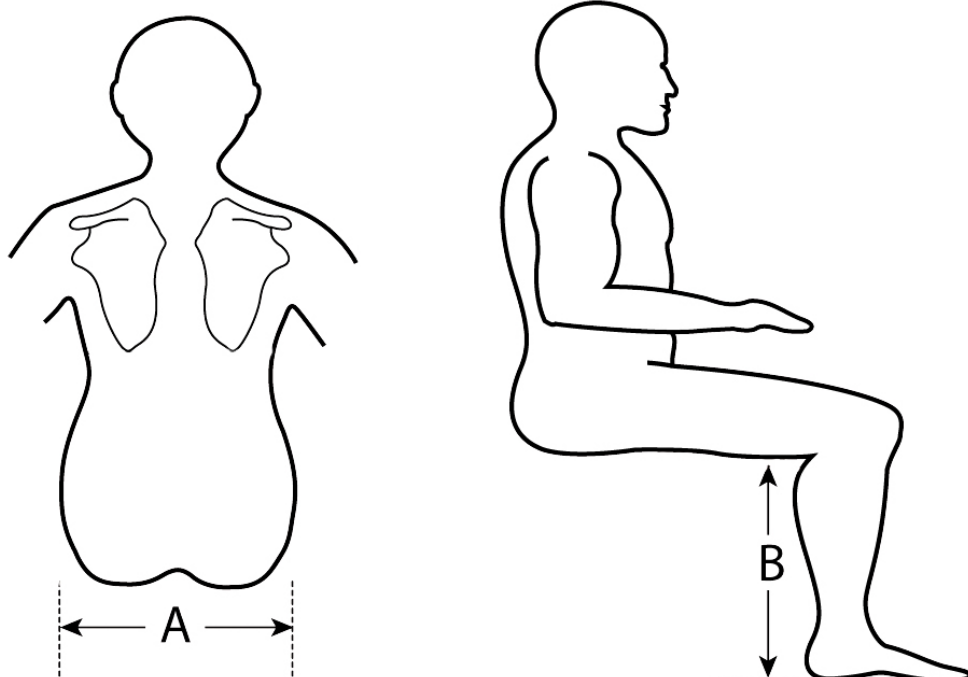

Yes, you can.®