



Invacare® | **Perfecto₂**

Individuel oxygenforsyning
i hjemmet, uden at gå på
kompromis

Trusted Solutions,
Passionate People



Den elegante *Invacare Perfecto₂* koncentrator overgår både brugernes og leverandørernes forventninger. Det høje innovationsniveau indenfor både styrke og lydudvikling sikrer stor brugerkomfort. Brugerens behov dækkes med en dosis på op til 5 liter i minuttet. Da **Perfecto₂** ikke kræver vedligeholdelse af komponenter de første 5 år, sikrer denne sammen med **HomeFill® II** den laveste samlede pris for oxygenforsyning i hjemmet, set over hele produktets levetid.



Stille ydelse

Den elegante *Invacare Perfecto₂* er kompakt, stille og kan let integreres i de hjemlige omgivelser. Nye teknikker har reduceret kompressor- og rensesøjlen til et nærmest ikke-eksisterende niveau. Brugeren kan derfor uforstyrret nyde de fredfyldte omgivelser i hjemmet og samtidig modtage korrekt oxygentilførsel.

Lavt el-forbrug

Den intelligente styringsenhed justerer det interne systemtryk i henhold til, hvilken mængde oxygen apparatet afgiver. I gennemsnit betyder det, at brugeren kan spare ca. 20 Watt i forhold til det allerede lave gennemsnitsforbrug på ca. 300 Watt.

Kompromisløs pålidelighed

Perfecto₂ er vedligeholdelsesfri i minimum 5 år. Dette giver brugeren tryghed og sikkerhed for at modtage den nødvendige oxygen, når der er behov for det. Takket være de nyeste fremskridt indenfor filtermateriale og kompressortechnologi sikrer **Perfecto₂** dig den laveste samlede pris for oxygenforsyning til hjemmet, set over hele produktets levetid.



Egenskaber



Energibesparelse

Med den intelligente strømbesparelses-software er **Perfecto₂** med til at støtte op om vores miljø.



Pålidelig oxygentilførselse

Perfecto₂ går ikke på kompromis og stiller ingen vedligeholdelseskrav de første 5 år.



Enkel at vedligeholde

Filteret vedligeholdes nemt via klappen bag på **Perfecto₂**.



SensO₂ giver en sikker overvågning af iltrenheden.



Brugervenligt design

De vigtigste betjeninger er placeret foran, så de er nemme at komme til.



Komplet løsning

XPO₂ med **Perfecto₂** er den komplette patientløsning til uafhængig iltforsyning.



HomeFill II kompatibel

Nyd fordelene ved at kunne fylde din egen letvægtsylinder.
(Model IOH200AW)












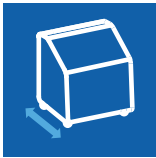




Pædiatrisk flowmeter

PreciseRx sikrer et regulerbart flow fra 50cc til 750cc pr. minut.
(Model: IRCPF16AW)




Technical data

For yderligere oplysninger, tekniske data etc. om dette produkt, se venligst i brugermanualen, der kan downloades på www.invacare.dk.

	Length	Width	Height	Weight	Charger	Power consumption	Pulse dose delivery
							
Perfecto₂	305 mm	380 mm	585 mm	20.5 kg	230 V, 50 Hz	280 W @ ≤ 3 l/min max. 300 W	0.5 - 5 l/min

	O2 purity	Outlet pressure	Sound level	Altitude	ISO Compliant
					
Perfecto₂	87 - 96%	34.5kPa ± 10%	<37 dB (A)	Up to 2500 m	ISO8359, AMD1

SensO₂ System

	Iltkoncentration
	højere end 85% - grønt lys - Normal
	imellem 73% og 85% - gult lys - Kontroller filter og flow
	lavere end 73% - rødt lys - Tilkald service

Serviceinterval

Intet behov for periodisk vedligehold i de første 5 år. Sliddele udskiftes efter behov.

Alarmer

- Batterifri poweralarm
- strømafbryder med resetfunktion
- overvågning af iltkoncentration
- sikkerhedsventil på kompressor
- temperaturovervågning på kompressor
- høj - og lavtryksalarm
- selvdiagnose med memoryfunktion
- lavt flow alarm

Tlf.: 3690 0000
Fax: 3690 0001
denmark@invacare.com
www.invacare.dk

Invacare A/S
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby
Danmark

Trusted Solutions,
Passionate People

